

Next Generation

Positioneringspuder



Optimal
lejrning



Next Generation Positioneringspuder

Next Generation positioneringspuder er udviklet til at stabilisere positioneringen og trykfordelingen med det formål at skabe en optimal lejring af mennesket.

Puderne indeholder ovale dynamiske kugler, der både er bløde og faste. Selv efter en trykbelastning på 50.000 gange beholder kuglerne stadig deres ovale form. Alle kugler er forseglede, vandtætte, antibakterielle og brandhæmmende.

Next Generation positioneringspuderne har en tyngde og stabilitet, der sikrer, at mennesket ligger i den ønskede stilling, uden at puderne falder sammen eller glider væk ved belastning over tid. Puderne kan moduleres i små tilpasningsområder og beholder den ønskede form, der understøtter mennesket. De udmærker sig også ved minimal varmeophobning med fugt til følge.

Betrækket er åndbart, strækbart, væsketæt, antibakterielt og brandhæmmende PU. Det har en godkendelse imod gennemtrængning, og bruges også til PPE klasse 3B standard mod virus gennemtrængning.

Next Generation positioneringspuder kan hurtigt vaskes af med desinfektionsmidler og tørrer i løbet af få minutter.

Make Rehab tilbyder at udvikle specialtilrettede puder efter behov.

Specifikationer

Rengøring	Overtørring med desinfektionsmidler
Stof	Strækbart og slidstærkt
Vandtæt	Ja - Godkendt i henhold til ISO 811 Textile fabrics - determination of resistance to water penetration - hydrostatic pressure test
Antibakteriel	Ja - Godkendt i henhold til: BS EN ISO 2286-2 Rubber- or plastics-coated fabrics - determination of roll characteristics - methods for determination of total mass per unit area, mass per unit area of coating and mass per unit area of substrate ISO 5978 Rubber- or plastics-coated fabrics - determination of blocking resistance BS ISO 22196 Plastics - measurement of antibacterial activity on plastics surfaces
Åndbar	Ja - Godkendt i henhold til ASTM E96/E96M Test methods for water vapor transmission of materials
Brandhæmmende	Ja - Godkendt i henhold til BS EN ISO 6940 Textile fabrics - burning behaviour - determination of ease of ignition of vertically oriented specimens
Biokompatibilitet	Ja - Godkendt i henhold til BS EN ISO 10993-5 Biological evaluation of medical devices - part 5: tests for in vitro cytotoxicity
Holdbarhed	Ja - Godkendt i henhold til BS EN ISO 7854 Rubber- or plastics-coated fabrics - determination of resistance to damage by flexing
Beskyttende tøj	Ja - Godkendt i henhold til BS EN 14605 Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (type 3) or spray-tight (type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (types pb [3] and pb [4])
Antistatisk	Ja - Godkendt i henhold til DIN ISO 2878 Rubber, vulcanized - antistatic and conductive products - determination of electrical resistance

Søhest pude

Fås også i Junior størrelse

Puden gør det muligt at lave en stabil sidelejring og lejring med én og samme pude. Det er nemt at foretage en omlejring fra 70 grader til 30 grader. Puden kan også benyttes til 135 graders lejring, her placeres den fortil.

Pudens stabilitet og tyngde skaber tryghed, stor trykfordeling i forhold til tryksårforebyggelse og afgrænsning. Dette skaber et godt udgangspunkt for respiration og tonusregulering.

Puden kan suppleres med Cylinder puden varenummer NTG11 og Bogstøtte puden varenummer NTG10 afhængig af balancepunkt og Oval pude varenummer NTG13 eller Hoved stabilisator large varenummer NTG09 ved kontrakturer i UE.



	Junior	
Længde	180 cm	110 cm
Bredde	30 cm	18 cm
Højde fleksibel	6-12 cm	2-10 cm
Vægt	4 kg	1,4 kg

	Junior	
Varenummer	NTG01	NTG50
HMI nr	129720	134319

Tilbehør	Junior	
Jerseybetræk	NTGB-01	NTGB-50



U-pude med slope

Puden er grundelementet i semifowler position med 30 graders eleveret truncus og hoved.

Udformningen af puden sikrer en stabil semifowler position med stabil understøttelse af truncus og hoved. Slopefunktionen skaber mulighed for ekstra støtte omkring hofter og bækken og anvendes som taktil proprioceptiv stimuli. Semifowler positionen tilgodeser respirationen, udover at være unik i forhold til trykfordeling. Desuden bidrager puden til at optimere aktiviteter som sondeernæring.

Puden kan også benyttes til at stabilisere bækkenet siddende i sengen, på sengekanten eller træningsbriks. Materialets tyngde og kvalitet forhindrer ustabile lejringer og er temperaturregulerende, hvilket sikrer et bedre mikroklima.

Puden kan med fordel suppleres med en Hoved stabilisator small varenummer NTG08 eller Hoved stabilisator large varenummer NTG09 langs rygsøjlen eller til at skabe lændesvaj.



Ydermål:

Længde	124 cm
Bredde	80 cm
Højde	4-18 cm

Indermål:

fleksibelt	25-55 cm
Vægt	4,2 kg

Varenummer	NTG02
HMI nr	129897

Tilbehør

Jerseybetræk	NTGB-02
--------------	---------

Fixzy pude small/medium

Fixzy puden er udviklet med fokus på at skabe en tryk og enkel sidelejrning til de mennesker, der ikke har behov for massiv afgrænsning. Den giver samtidig mulighed for, at mennesker med nedsat truncus stabilitet og balance kan lejes i et sideleje, hvor den rektale vinkel opretholdes. Pudens "fødder" stabiliseres langs ryg/lænd og stabiliseres fortil langs brystet. Dermed mindskes rul i sengen.

Puden er primært udviklet til at skabe tryk og "kram" til mennesker med smerter og uro, som er vanskelige at udføre nedre hygiejne på eller til obstiperede patienter, som ikke kan opretholde vinklen uden ekstra støtte langs ryg og fortil. Puden giver en unik mulighed for både at give SI input på forside og bagsiden af torso i én og samme pude. Størrelsen af pudevalg afhænger af personens hoftemål.



Længde	75 cm
Bredde	33 cm
Højde	15 cm

Indermål:	
fleksibelt	20-35 cm
Vægt	
2 kg	

Varenummer	NTG03
HMI nr	129898

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-03

Fixzy pude large/extra large

Fixzy puden er udviklet med fokus på at skabe en tryk og enkel sidelejrning til de mennesker, der ikke har behov for massiv afgrænsning. Den giver samtidig mulighed for, at mennesker med nedsat truncus stabilitet og balance kan lejes i et sideleje, hvor den rektale vinkel opretholdes. Pudens "fødder" stabiliseres langs ryg/lænd og stabiliseres fortil langs brystet. Dermed mindskes rul i sengen.

Puden er primært udviklet til at skabe tryk og "kram" til mennesker med smerter og uro, som er vanskelige at udføre nedre hygiejne på eller til obstiperede patienter, som ikke kan opretholde vinklen uden ekstra støtte langs ryg og fortil. Puden giver en unik mulighed for både at give SI input på forside og bagsiden af torso i én og samme pude. Størrelsen af pudevalg afhænger af personens hoftemål.



Længde	80 cm
Bredde	40 cm
Højde	15 cm

Indermål:	
fleksibelt	30-50 cm
Vægt	
2,3 kg	

Varenummer	NTG04
HMI nr	129904

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-04

Skødepude small

Fås også i Junior størrelse

Puden har mange anvendelses- og kombinationsmuligheder. Den kan benyttes i skødet med henblik på aflastning af underarme, SI-stimulation samt ved siddende aktiviteter i seng eller stol.

Pudens tyngde giver ro og afgrænsning. Ved mindre personer kan puden anvendes som stabilisator af bækkenet. Dette med henblik på at skabe symmetri og alignment hos benamputerede eller apopleksi patienter i forhold til tonusregulering.

Puden kan desuden bruges som nakkepude med henblik på at skabe en stabil lejrning hos personer med nedsat hovedkontrol. Samt i forbindelse med dræn, ventiler eller frakturer i nakke/halsområdet.

Derudover er puden anvendelig til understøttelse af thorax i bugleje, suppleret med Hoved stabilisator small eller large varenummer NTG08 eller NTG09 eller Bogstøtte puden varenummer NTG10.



	Junior	
Længde	55 cm	37 cm
Bredde	50 cm	37 cm
Højde	8 cm	8 cm
Indermål, fleks.	28-38 cm	18-28 cm
Vægt	1,2 kg	1 kg

	Junior	
Varenummer	NTG05	NTG53
HMI nr	129925	134323

Tilbehør	Junior	
Jerseybetræk	NTGB-05	NTGB-53



Skødepude large

Puden har mange anvendelses- og kombinationsmuligheder. Den kan benyttes i skødet med henblik på aflastning af underarme, SI-stimulation samt ved siddende aktiviteter i seng eller stol.

Pudens tyngde giver ro og afgrænsning. Ved mindre personer kan puden anvendes som stabilisator af bækkenet. Dette med henblik på at skabe symmetri og alignment hos benamputerede eller apopleksi patienter i forhold til tonusregulering.

Puden kan desuden bruges som nakkepude med henblik på at skabe en stabil lejrning hos personer med nedsat hovedkontrol. Samt i forbindelse med dræn, ventiler eller frakturer i nakke/halsområdet.

Derudover er puden anvendelig til understøttelse af thorax i bugleje, suppleret med Hoved stabilisator small eller large varenummer NTG08 eller NTG09 eller Bogstøtte puden varenummer NTG10.



Længde	60 cm
Bredde	60 cm
Højde	10 cm

Indermål:	
fleksibelt	38-48 cm
Vægt	
1,5 kg	

Varenummer	NTG06
HMI nr	129926

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-06

Halvcirkel ørepude

Fås også i Junior størrelse

Puden forhindrer tryk på øret. Udformningen skaber ligeledes mulighed for at benytte puden til fritlægning af et mindre område, eksempelvis særligt udsatte knoglefremspring. Samtidig fordeles trykfordelingen omkring det udsatte område.

Bemærk pudens fyld er støjsvagt, hvilket er en fordel for lydsensitive personer.



	Junior	
Længde	38 cm	35 cm
Bredde	18 cm	14 cm
Højde	6 cm	6 cm
Hul	8 x 8 cm	7 x 7 cm
Vægt	0,3 kg	0,25 kg

	Junior	
Varenummer	NTG07	NTG54
HMI nr	129937	134322

Tilbehør	Junior	
Jerseybetræk	NTGB-07	NTGB-54



Hoved stabilisator small

Puden sikrer små, men vigtige stillingsskift. Puden har et hav af anvendelsesmuligheder. Den kan nemt benyttes til udfyldelse af hulrum i forbindelse med fejlstillinger og kontrakturer. Den kan også benyttes til at skabe lændesvaj ved tendens til bagud roteret bækken, hvilket skaber en bedre siddende stilling i seng og stol.

Puden er meget anvendelig til understøttelse af løst væv og kan benyttes som stabilisator sammen med Make Rehabs øvrige positioneringspuder.



Længde	34 cm
Bredde	20 cm
Højde	8 cm
Vægt	0,3 kg

Varenummer	NTG08
HMI nr	129938

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-08

Hoved stabilisator large

Pudens størrelse optimerer en stabil understøttelse med god trykfordeling af hoved, nakke og rygsøjle i semifowler positionen. Pudsen kan ligeledes benyttes til sideliggende mellem knæ, ved 135 grader lejring, som rygstøtte i 70 graders lejring til personer med nogen balance og selvhjulpne i forbindelse med omlejring, hvor fuld afgrænsning ikke er nødvendig. Derudover er den anvendelig i bugleje til understøttelse af arme og skulderområde.



Længde	50 cm
Bredde	38 cm
Højde	10 cm
Vægt	0,6 kg

Varenummer	NTG09
HMI nr	129939

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-09

Bogstøtte pude

Pudens udformning giver mange anvendelsesmuligheder og kan sammenlignes med en bogstøtte, der skaber stabilitet, hvor der må være ustabilitet.

Bogstøtte puden kan benyttes som stabilisatorpude i sideleje, enten i kombination med Søhest puden varenummer NTG01 eller Flexo pude varenummer NTG17. Den kan benyttes til at understøtte albueled og underarm ved bugleje. Eller som let lænde/rygstøtte pude i sideleje til mennesker med nedsat balance-trunkus stabilitet. Puden udmærker sig også til mennesker med nedsat hovedkontrol, som kræver en stabil understøttelse. Dette for at hindre fejlsynkning.

Den kan også med fordel anvendes til at understøtte et knæ, præ- og post-operative indgreb eller i forbindelse med fraktur i lårben eller underben. I den situation skal den kombineres med enten Læg/slope pude varenummer NTG14 eller Cylinder puden varenummer NTG11.



Længde	30 cm
Bredde	30 cm
Højde	30 cm
Vægt	1,2 kg

Varenummer	NTG10
HMI nr	129961

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-10

Cylinder pude

Puden er endnu en i rækken af seriens puder med stor funktionalitet og variation. Den kan benyttes som stabilisator under knæene for at undgå shear i forbindelse med rygleje/semifowler og i sideliggende leje i ryggen. Den er også meget anvendelig mellem knæene og eller fortil i sideleje til det urolige menneske, som har brug for tryk og SI-stimulation.

Endelig kan den bruges i forbindelse med re-positionering/re-lejring fra 90-70-30 grader sideliggende, hvor puden fungerer som stabilisator pude bag eksempelvis Søhesten varenummer NTG01, til at understøtte kontraktuelle knæled og derved skabe større understøttelsesflade ved at udfylde hulrum. Endnu et eksempel på stor variation, anvendelighed og funktionalitet i én og samme pude.



Længde	60 cm
Bredde	25 cm
Vægt	2 kg

Varenummer	NTG11
HMI nr	129981

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-11



Flexarme til kørestol

Pudernes udformning og materiale gør det muligt at skabe eller genvinde personens neutrale stilling, hvor armene bliver understøttet tæt på midtlinjen. Dette understøtter kroppens naturlige bevægemønster. Pudens arme skaber ro, tryghed og afgrænsning, hvilket ligeledes har stor indflydelse på personens funktionsniveau og almene tilstand.

Tyngden i materialet og flexarmenes udformning sikrer, at personens arme ligger stabilt, og gør det nemt for personalet at flytte dem.

Flexarme er universelle og kan monteres på de fleste typer kørestole.



Længde	80 cm
Bredde	18 cm
Højde	5 cm
Vægt	0,4 kg

Varenummer	NTG12
HMI nr	129985

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-12

Oval pude

Oval puden er tiltænkt som en støttepude, hvilket giver mange muligheder i forhold til udfyldning af "hulrum" mellem krop og underlag. Pudens kan bruges til at skabe mikrostimulation, hvor vi ved selv små justeringer, ved at lade den "lille pude vandre" ændrer på trykfordelingen og herved forebygger tryksår. Pudens kan anvendes til at aflaste specifikke kropsdele eksempelvis knoglefremspring omkring albueled.

En lille pude med en stor værdig og betydning i forbindelse med lejring ud fra et 24 timers perspektiv.



Længde	30 cm
Bredde	20 cm
Højde	5 cm
Vægt	0,2 kg

Varenummer	NTG13
HMI nr	129986

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-13



Læg/slope pude

Fås også i Junior størrelse

Læg/slope pudens form er med til at forebygge fejlstillinger som adduktion og abduktion omkring knæ. Den kan med fordel anvendes sammen med Skøde pude small varenummer NTG05, Skøde pude large varenummer NTG06 eller U-pude med slope varenummer NTG02. På den måde forebygges fejlstillingen fra bækkenet, som altid er det primære udgangspunkt for fejlstillinger.

Desuden kan puden benyttes i tilfælde hvor sengens knæknæk ikke matcher menneskets anatomi. I disse tilfælde i kombination med Hoved stabilisator large varenummer NTG09 eller Cylinder pude varenummer NTG11, hvis der er begyndende tegn på fejlstillinger i fodled, også kaldet dropfødder.



	Junior	
Længde	60 cm	37 cm
Bredde	40 cm	27 cm
Højde	5-26 cm	3-17 cm
Vægt	3,2 kg	0,9 kg

	Junior	
Varenummer	NTG14	NTG60
HMI nr	129987	134324

Tilbehør	Junior	
Jerseybetræk	NTGB-14	NTGB-60

Butterfly nakkepude

Butterfly nakkepudens unikke udformning sikrer, at nakkens position opretholdes hos mennesker med nedsat hovedkontrol. Fyldet former sig inden i puden, så den ønskede position opretholdes. Pudens størrelse sikrer, at personens syn ikke svækkes. Dette for at personen kan opretholde sit synsfelt og opretholde visuel kontakt med omverden. Herved skabes tryghed, symmetri og trykfordeling uden at fratage mennesket de visuelle input fra synssansen.



Længde	30 cm
Bredde	15 cm
Højde	14 cm
Vægt	0,4 kg

Varenummer	NTG15
HMI nr	129988

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-15

Hæl/arm kile pude

Puden gør det muligt at lejre en specifik kropsdel. Materialefyldet sikrer, at puden holder formen, så det er muligt at opnå en total aflastning af hælene i forbindelse med forebyggelse af tryksår. Udformningen og materialet er både stabilt og formbart. Så arm eller læg aflastes ned i materialet, og hulrummene mellem kropsdel og underlag/madras udfyldes. Dette for at skabe størst mulig trykfordeling, samtidig med at vinklen bibeholdes.

Dette gør, at puden ligeledes er velegnet til lejring af frakturer i arme eller ben, i forbindelse med operationer, hvor arme og underben skal lejres i en præcis position, ved lymfe drænage behandling og til forebyggelse af ødemdannelse.

Stabiliteten i puderne gør dem ligeledes egnede til lejring af arme eller ben med nedsat tonus med henblik på alignment og forebyggelse af fejlstillinger.



Længde	40 cm
Bredde	26 cm
Højde	5-10 cm
Vægt	0,25 kg

Varenummer	NTG16
HMI nr	129989

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-16

Flexo pude

Flexo puden er den ultimative ener. Pudens længde og tyngde gør det muligt, både let og fleksibelt, at lejre med én og samme pude i rygliggende - semifowler position, sideliggende i 30, 70 og 90 grader samt næsten i bugleje i 135 grader.

Puden er syet med 2 kanaler, som sikrer, at pudens fyld ikke forsvinder væk under mennesket under re-positionering. Stabilitet og afgrænsning er her nøgleordene, og indtænkt sammen med øget fleksibilitet i anvendelsesmulighederne. Derudover kan puden både anvendes af det menneske, som har behov for lejring, men er delvis selvhjulpnen og selv kan deltage aktivt i stillingskift. Flexo puden kan også anvendes til det immobile menneske, som har behov for hjælp ved re-positioneringer.

Puden kan med fordel indgå som primær pudeløsning og suppleres med Bogstøtte pude varenummer NTG10, Cylinder pude varenummer NTG11, Oval pude varenummer NTG13 i sideleje og Hoved stabilisator small varenummer NTG08 eller Hoved stabilisator large varenummer NTG09, Hæl/arm kile pude varenummer NTG16 eller H-pude varenummer NTG18 i rygliggende. Dette afgøres af det konkrete behov og menneskets funktionsniveau.



Længde	190 cm
Bredde	25 cm
Højde	12 cm
Vægt	4 kg

Varenummer	NTG17
HMI nr	129990

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-17



H-pude

Fås også i Junior størrelse

H-puden er specielt egnet til lejring af ben i sideliggende stilling. Til at korrigere adduktion og tonus af UE, med fokus på alignment. Desuden er puden anvendelig i rygliggende til at forebygge abduktion af UE og sikre, at hælene er fri af underlaget, hvis der er risiko for udvikling af tryksår.

Puden er en del af vores specialiserede puder, som vi ofte anvender hos mennesker med CP.



	Junior	
Længde	48 cm	35 cm
Bredde	30 cm	20 cm
Højde	30 cm	15 cm
Vægt	2 kg	0,6 kg

	Junior	
Varenummer	NTG18	NTG64
HMI nr	129991	134325

Tilbehør	Junior	
Jerseybetræk	NTGB-18	NTGB-64

Zitsafe

ZitSafe pudens udformning gør det muligt at omslutte borger med nedsat trunkus stabilitet, øget tonus i OE eller motorisk uro. Så borger kan sidde stabilt og trygt på sengekanten eller ved siddende behandling på briks.

Pudens høje sider og den høje ryg danner en stabil ramme, som stabiliserer balance og forhindre baglæns fald eller sidelæns.

Den kan med fordel anvendes ved forflytning, tidlig mobilisering og behandling eller anden aktivitet siddende på sengekant eller briks

Armlænenes bevægelighed gør det muligt omslutte borgeren helt tæt om kroppen, hvilket giver tryk i den siddende stilling. Materialets stabilitet gør at armlænene giver borger mulighed for afsæt med brug af armene fra siddende til stående.

Pudens design, formbarhed og stabilitet med en total vægt på 5,8 kg gør det muligt at sikre en stabil aktiv siddestilling.



Bredde	70-95 cm
Innder bredde	25-60 cm
Armlæn højde	26 cm
Ryglæn højde	60 cm
Vægt	5,8 kg

Varenummer	NTG19
HMI nr	138488

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-19



NTG01 og NTG10
Søhest pude og Bogstøtte pude



NTG12
Flexarme til
kørestol



NTG02 og NTG11
U-pude med slope
og Cylinder pude



NTG05
Skødepude
small

NTG14 Læg/slope pude



NTG03 og NTG07
Fixzy pude small/medium
og Halvcirkel ørepude




NTG10 og NTG17
Bogstøtte pude
og Flexo
pude



NTG15
Butterfly nakkepude



NTG01
og NTG10
Sohest pude og
Bogstøtte pude

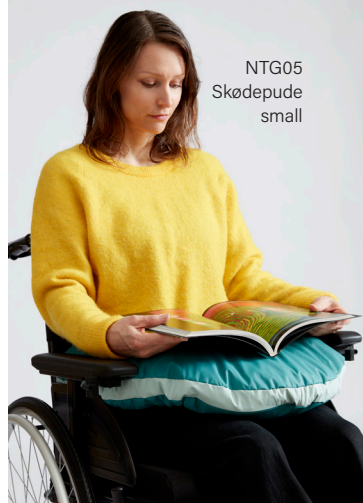

NTG05
Skødepude
small



NTG01 og NTG10
Sohest pude og Bogstøtte pude



NTG07
Halvcirkel
ørepude




NTG10 Bogstøtte pude



NTG16
Hæl/arm kile pude



NTG19 Zitsafe pude

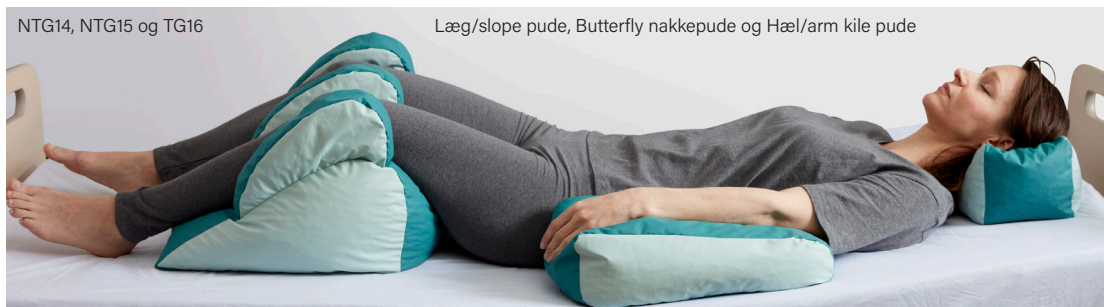

NTG14, NTG15 og TG16

Læg/slope pude, Butterfly nakkepude og Hæl/arm kile pude

Noter

[illegible]

Noter

[illegible]



Make Rehab A/S

info@makerehab.dk
makerehab.com

Hovedkontor
+45 91 912 912

Sjælland & Øerne
+45 91 917 917

Jylland & Fyn
+45 91 919 919