



Advarsel/ forholdsregler

Make Rehab A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt. Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt Make Rehab A/S med det samme.

For at sikre korrekt brug af Next Generation positioneringspuder, skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med ⚠.

Next Generation positioneringspuder

Anvendelse

Next Generation positioneringspuder er udviklet til at stabilisere positioneringen og trykfordelingen med det formål at skabe en optimal lejring af mennesket.

Der er ingen kontraindikationer forbundet med positionering med Next Generation positioneringspuder.

Beskrivelse

Puderne indeholder ovale dynamiske kugler, der både er bløde og faste. Selv efter en trykbelastning på 50.000 gange beholder kuglerne stadig deres ovale form. Alle kugler er forsegledede, vandtætte, antibakterielle og brandhæmmende.

Next Generation positioneringspuderne har en tyngde og stabilitet, der sikrer, at mennesket ligger i den ønskede stilling, uden at puderne falder sammen eller glider væk ved belastning over tid. Puderne kan moduleres i små tilpasningsområder og beholder den ønskede form, der understøtter mennesket. De udmærker sig også ved minimal varmeophobning med fugt til følge.

Betrækket er åndbart, strækbart, væsketæt, antibakterielt og brandhæmmende PU. Det har en godkendelse imod gennemtrængning, og bruges også til PPE klasse 3B standard mod virus gennemtrængning.

Next Generation positioneringspuder kan hurtigt vaskes af med desinfektionsmidler og tørrer i løbet af få minutter.

Make Rehab tilbyder at udvikle specialtilrettede puder efter behov.

Før brug

⚠ Vær opmærksom på, at Next Generation positioneringspuden, som du vil anvende, er rengjort og intakt, før du tager den i brug.



Pudeoversigt

Fås også i Junior



NTG01 Søhest pude



NTG02 U-pude med slope



NTG03 Fixzy pude small/medium



NTG04 Fixzy pude
large/extra large

Fås også i Junior



NTG05 Skødepude small



NTG06 Skødepude large

Fås også i Junior



NTG07 Halvcirkel ørepude



NTG08 Hoved stabilisator small



NTG09 Hoved stabilisator large



NTG10 Bogstøtte pude



NTG11 Cylinder pude



NTG12 Flexarme til kørestol



NTG13 Oval pude



NTG14 Læg/slope pude



NTG15 Butterfly nakkepude



NTG16 Hæl/arm kile pude

Fås også i Junior



NTG17 Flexo pude



NTG18 H-pude



NTG19 Zitsafe pude

Søhest pude

Fås også i Junior størrelse

Puden gør det muligt at lave en stabil sidelejring og lejring med én og samme pude. Det er nemt at foretage en omlejring fra 70 grader til 30 grader. Puden kan også benyttes til 135 graders lejring, her placeres den fortil.

Pudens stabilitet og tyngde skaber tryghed, stor trykfordeling i forhold til tryksårsforebyggelse og afgrænsning. Dette skaber et godt udgangspunkt for respiration og tonusregulering.

Puden kan suppleres med Cylinder puden varenummer NTG11 og Bogstøtte puden varenummer NTG10 afhængig af balancepunkt og Oval pude varenummer NTG13 eller Hoved stabilisator large varenummer NTG09 ved kontrakturer i UE.



	Junior	
Længde	180 cm	110 cm
Bredde	30 cm	18 cm
Højde fleksibel	6-12 cm	2-10 cm
Vægt	4 kg	1,4 kg

	Junior	
Varenummer	NTG01	NTG50
HMI nr	129720	134319

Tilbehør	Junior	
Jerseybetræk	NTGB-01	NTGB-50

U-pude med slope

Puden er grundelementet i semifowler position med 30 graders eleveret truncus og hoved. Udformningen af puden sikrer en stabil semifowler position med stabil understøttelse af truncus og hoved. Slopefunktionen skaber mulighed for ekstra støtte omkring hofter og bækken og anvendes som taktile proprioceptiv stimuli. Semifowler positionen tilgodeser respirationen, udover at være unik i forhold til trykfordeling. Desuden bidrager puden til at optimere aktiviteter som sondeernæring.

Puden kan også benyttes til at stabilisere bækkenet siddende i sengen, på sengekanten eller træningsbriks. Materialets tyngde og kvalitet forhindrer ustabile lejring og er temperaturregulerende, hvilket sikrer et bedre mikroklima.

Puden kan med fordel suppleres med en Hoved stabilisator small varenummer NTG08 eller Hoved stabilisator large varenummer NTG09 langs rygsøjlen eller til at skabe lændesvej.



Ydermål:	
Længde	124 cm
Bredde	80 cm
Højde	4-18 cm
Indermål:	
fleksibelt	25-55 cm
Vægt	4,2 kg

Varenummer	NTG02
HMI nr	129897

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-02

Fixzy pude small/medium

Fixzy puden er udviklet med fokus på at skabe en tryk og enkel sidelejrning til de mennesker, der ikke har behov for massiv afgrænsning. Den giver samtidig mulighed for, at mennesker med nedsat truncus stabilitet og balance kan lejes i et sideleje, hvor den rektale vinkel opretholdes. Pudens "fødder" stabiliseres langs ryg/lænd og stabiliseres fortil langs brystet. Dermed mindskes rul i sengen.

Puden er primært udviklet til at skabe tryk og "kram" til mennesker med smerter og uro, som er vanskelige at udføre nedre hygiejne på eller til obstiperede patienter, som ikke kan opretholde vinklen uden ekstra støtte langs ryg og fortil. Puden giver en unik mulighed for både at give SI input på forside og bagsiden af torso i én og samme pude. Størrelsen af pudevalg afhænger af personens hoftemål.



Længde	75 cm
Bredde	33 cm
Højde	15 cm
Indermål:	
fleksibelt	20-35 cm
Vægt	2 kg

Varenummer	NTG03
HMI nr	129898

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-03

Fixzy pude large/extra large

Fixzy puden er udviklet med fokus på at skabe en tryk og enkel sidelejrning til de mennesker, der ikke har behov for massiv afgrænsning. Den giver samtidig mulighed for, at mennesker med nedsat truncus stabilitet og balance kan lejes i et sideleje, hvor den rektale vinkel opretholdes. Pudens "fødder" stabiliseres langs ryg/lænd og stabiliseres fortil langs brystet. Dermed mindskes rul i sengen.

Puden er primært udviklet til at skabe tryk og "kram" til mennesker med smerter og uro, som er vanskelige at udføre nedre hygiejne på eller til obstiperede patienter, som ikke kan opretholde vinklen uden ekstra støtte langs ryg og fortil. Puden giver en unik mulighed for både at give SI input på forside og bagsiden af torso i én og samme pude. Størrelsen af pudevalg afhænger af personens hoftemål.



Ydermål:	
Længde	80 cm
Bredde	40 cm
Højde	15 cm
Indermål:	
fleksibelt	30-50 cm
Vægt	2,3 kg

Varenummer	NTG04
HMI nr	129904

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-04

Skødepude small

Fås også i Junior størrelse

Puden har mange anvendelses- og kombinationsmuligheder. Den kan benyttes i skødet med henblik på aflastning af underarme, SI-stimulation samt ved siddende aktiviteter i seng eller stol.

Pudens tyngde giver ro og afgrænsning. Ved mindre personer kan puden anvendes som stabilisator af bækkenet. Dette med henblik på at skabe symmetri og alignment hos benamputerede eller apopleksi patienter i forhold til tonusregulering.

Puden kan desuden bruges som nakkepude med henblik på at skabe en stabil lejring hos personer med nedsat hovedkontrol. Samt i forbindelse med dræn, ventiler eller frakturer i nakke/halsområdet.

Derudover er puden anvendelig til understøttelse af thorax i bugleje, suppleret med Hoved stabilisator small eller large varenummer NTG08 eller NTG09 eller Bogstøtte puden varenummer NTG10.



	Junior	
Længde	55 cm	37 cm
Bredde	50 cm	37 cm
Højde	8 cm	8 cm
Indermål, fleks.	28-38 cm	18-28 cm
Vægt	1,2 kg	1 kg

	Junior	
Varenummer	NTG05	NTG53
HMI nr	129925	134323

Tilbehør	Junior	
Jerseybetræk	NTGB-05	NTGB-53

Skødepude large

Puden har mange anvendelses- og kombinationsmuligheder. Den kan benyttes i skødet med henblik på aflastning af underarme, SI-stimulation samt ved siddende aktiviteter i seng eller stol.

Pudens tyngde giver ro og afgrænsning. Ved mindre personer kan puden anvendes som stabilisator af bækkenet. Dette med henblik på at skabe symmetri og alignment hos benamputerede eller apopleksi patienter i forhold til tonusregulering.

Puden kan desuden bruges som nakkepude med henblik på at skabe en stabil lejring hos personer med nedsat hovedkontrol. Samt i forbindelse med dræn, ventiler eller frakturer i nakke/halsområdet.

Derudover er puden anvendelig til understøttelse af thorax i bugleje, suppleret med Hoved stabilisator small eller large varenummer NTG08 eller NTG09 eller Bogstøtte puden varenummer NTG10.



Længde	60 cm
Bredde	60 cm
Højde	10 cm
Indermål:	
fleksibelt	38-48 cm
Vægt	1,5 kg

Varenummer	NTG06
HMI nr	129926

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-06

Halvcirke ørepudder

Fås også i Junior størrelse

Puden forhindrer tryk på øret. Udformningen skaber ligeledes mulighed for at benytte puden til fritlægnings af et mindre område, eksempelvis særligt udsatte knoglefrem-spring. Samtidig fordeles trykfordelingen omkring det udsatte område.

Bemærk pudens fyld er støjsvagt, hvilket er en fordel for lydsensitive personer.



	Junior	
Længde	38 cm	35 cm
Bredde	18 cm	14 cm
Højde	6 cm	6 cm
Hul	8 x 8 cm	7 x 7 cm
Vægt	0,3 kg	0,25 kg

	Junior	
Varenummer	NTG07	NTG54
HMI nr	129937	134322

Tilbehør	Junior	
Jerseybetræk	NTGB-07	NTGB-54

Hoved stabilisator small

Puden sikrer små, men vigtige stillingsskift. Puden har et hav af anvendelses-muligheder. Den kan nemt benyttes til udfyldelse af hulrum i forbindelse med fejlstillinger og kontrakturer. Den kan også benyttes til at skabe lændesvaj ved tendens til bagud roteret bækken, hvilket skaber en bedre siddende stilling i seng og stol.

Puden er meget anvendelig til understøttelse af løst væv og kan benyttes som stabilisator sammen med Make Rehabs øvrige positioneringspuder.



Længde	34 cm
Bredde	20 cm
Højde	8 cm
Vægt	0,3 kg

Varenummer	NTG08
HMI nr	129938

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-08

Hoved stabilisator large

Pudens størrelse optimerer en stabil understøttelse med god trykfordeling af hoved, nakke og rygsøjle i semifowler positionen. Pudsen kan ligeledes benyttes til sideliggende mellem knæ,

ved 135 grader lejring, som rygstøtte i 70 graders lejring til personer med nogen balance og selvhjulpne i forbindelse med omlejring, hvor fuld afgrænsning ikke er nødvendig.

Derudover er den anvendelig i bugleje til understøttelse af arme og skulderområde.



Længde	50 cm
Bredde	38 cm
Højde	10 cm
Vægt	0,6 kg

Varenummer	NTG09
HMI nr	129939

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-09

Bogstøtte pude

Pudens udformning giver mange anvendelsesmuligheder og kan sammenlignes med en bogstøtte, der skaber stabilitet, hvor der må være ustabilitet.

Bogstøtte pudsen kan benyttes som stabilisatorpude i sideleje, enten i kombination med Søhest pudsen varenummer NTG01 eller Flexo pude varenummer NTG17. Den kan benyttes til at understøtte albueled og underarm ved bugleje. Eller som let lænde/rygstøtte pude i sideleje til mennesker med nedsat balance-trunkus stabilitet. Pudsen udmærker sig også til mennesker med nedsat hovedkontrol, som kræver en stabil understøttelse. Dette for at hindre fejlsynkning.

Den kan også med fordel anvendes til at understøtte et knæ, præ- og postoperative indgreb eller i forbindelse med fraktur i lårben eller underben. I den situation skal den kombineres med enten Læg/slope pude varenummer NTG14 eller Cylinder pudsen varenummer NTG11.



Længde	30 cm
Bredde	30 cm
Højde	30 cm
Vægt	1,2 kg

Varenummer	NTG10
HMI nr	129961

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-10

Cylinder pude

Puden er endnu en i rækken af seriens puder med stor funktionalitet og variation. Den kan benyttes som stabilisator under knæene for at undgå shear i forbindelse med rygleje/semifowler og i sideliggende leje i ryggen. Den er også meget anvendelig mellem knæene og eller fortil i sideleje til det urolige menneske, som har brug for tryk og SI-stimulation.

Endelig kan den bruges i forbindelse med re-positionering/re-lejring fra 90-70-30 grader sideliggende, hvor puden fungerer som stabilisator pude bag eksempelvis Søhesten varenummer NTG01, til at understøtte kontraktuelle knæled og derved skabe større understøttelsesflade ved at udfylde hulrum. Endnu et eksempel på stor variation, anvendelighed og funktionalitet i én og samme pude.



Længde	60 cm
Bredde	25 cm
Vægt	2 kg

Varenummer	NTG11
HMI nr	129981

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-11

Flexarme til kørestol

Pudernes udformning og materiale gør det muligt at skabe eller genvinde personens neutrale stilling, hvor armene bliver understøttet tæt på midtlinjen. Dette understøtter kroppens naturlige bevægemønster. Pudens arme skaber ro, tryk og afgrænsning, hvilket ligeledes har stor indflydelse på personens funktionsniveau og almene tilstand.

Tyngden i materialet og flexarmenes udformning sikrer, at personens arme ligger stabilt, og gør det nemt for personalet at flytte dem.

Flexarme er universelle og kan monteres på de fleste typer kørestole.



Længde	80 cm
Bredde	18 cm
Højde	5 cm
Vægt	0,4 kg

Varenummer	NTG12
HMI nr	129985

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-12

Oval pude

Oval puden er tiltænkt som en støttepude, hvilket giver mange muligheder i forhold til udfyldning af "hulrum" mellem krop og underlag. Pudene kan bruges til at skabe mikrostimulation, hvor vi ved selv små justeringer, ved at lade den "lille pude vandre" ændrer på trykfordelingen og herved forebygger tryksår. Pudene kan anvendes til at aflaste specifikke kropsdele eksempelvis knoglefremspring omkring albueled.

En lille pude med en stor værdig og betydning i forbindelse med lejring ud fra et 24 timers perspektiv.



Længde	30 cm
Bredde	20 cm
Højde	5 cm
Vægt	0,2 kg

Varenummer	NTG13
HMI nr	129986

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-13

Læg/slope pude

Fås også i Junior størrelse

Læg/slope pudens form er med til at forebygge fejlstillinger som adduktion og abduktion omkring knæ. Den kan med fordel anvendes sammen med Skøde pude small varenummer NTG05, Skøde pude large varenummer NTG06 eller U-pude med slope varenummer NTG02. På den måde forebygges fejlstillingen fra bækkenet, som altid er det primære udgangspunkt for fejlstillinger.

Desuden kan puden benyttes i tilfælde hvor sengens knæknæk ikke matcher menneskets anatomi. I disse tilfælde i kombination med Hoved stabilisator large varenummer NTG09 eller Cylinder pude varenummer NTG11, hvis der er begyndende tegn på fejlstillinger i fodled, også kaldet dropfødder.



		Junior
Længde	60 cm	37 cm
Bredde	40 cm	27 cm
Højde	5-26 cm	3-17 cm
Vægt	3,2 kg	0,9 kg

		Junior
Varenummer	NTG14	NTG60
HMI nr	129987	134324

Tilbehør		Junior
Jerseybetræk	NTGB-14	NTGB-60

Butterfly nakkepude

Butterfly nakkepudens unikke udformning sikrer, at nakkens position opretholdes hos mennesker med nedsat hovedkontrol. Fyldet former sig inden i puden, så den ønskede position opretholdes. Pudens størrelse sikrer, at personens syn ikke svækkes. Dette for at personen kan opretholde sit synsfelt og opretholde visuel kontakt med omverden. Herved skabes tryghed, symmetri og trykfordeling uden at fratage mennesket de visuelle input fra synssansen.



Længde	30 cm
Bredde	15 cm
Højde	14 cm
Vægt	0,4 kg

Varenummer	NTG15
HMI nr	129988

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-15

Hæl/arm kile pude

Puden gør det muligt at lejre en specifik kropsdel. Materialefyldet sikrer, at puden holder formen, så det er muligt at opnå en total aflastning af hælene i forbindelse med forebyggelse af tryksår. Udformningen og materialet er både stabilt og formbart. Så arm eller læg aflastes ned i materialet, og hulrummene mellem kropsdel og underlag/madrass udfyldes. Dette for at skabe størst mulig trykfordeling, samtidig med at vinklen bibeholdes.

Dette gør, at puden ligeledes er velegnet til lejring af frakturer i arme eller ben, i forbindelse med operationer, hvor arme og underben skal lejres i en præcis position, ved lymfe drænage behandling og til forebyggelse af ødemdannelse.

Stabiliteten i puderne gør dem ligeledes egnede til lejring af arme eller ben med nedsat tonus med henblik på alignment og forebyggelse af fejlstillinger.



Længde	40 cm
Bredde	26 cm
Højde	5-10 cm
Vægt	0,25 kg

Varenummer	NTG16
HMI nr	129989

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-16

Flexo pude

Flexo puden er den ultimative ener. Pudens længde og tyngde gør det muligt, både let og fleksibelt, at lejre med én og samme pude i rygliggende - semifowler position, sideliggende i 30, 70 og 90 grader samt næsten i bugleje i 135 grader.

Puden er syet med 2 kanaler, som sikrer, at pudens fyld ikke forsvinder væk under mennesket under re-positionering.

Stabilitet og afgrænsning er her nøgleordene, og indtænkt sammen med øget fleksibilitet i anvendelsesmulighederne. Derudover kan puden både anvendes af det menneske, som har behov for lejring, men er delvis selvhjulpne og selv kan deltage aktivt i stillingskift. Flexo puden kan også anvendes til det immobile menneske, som har behov for hjælp ved re-positioneringer.



Længde	190 cm
Bredde	25 cm
Højde	12 cm
Vægt	4 kg

Varenummer	NTG17
HMI nr	129990

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-17

Puden kan med fordel indgå som primær pudeløsning og suppleres med Bogstøtte pude varenummer NTG10, Cylinder pude varenummer NTG11, Oval pude varenummer NTG13 i sideleje og Hoved stabilisator small varenummer NTG08 eller Hoved stabilisator large varenummer NTG09, Hæl/arm kile pude varenummer NTG16 eller H-pude varenummer NTG18 i rygliggende. Dette afgøres af det konkrete behov og menneskets funktionsniveau.

H-pude

Fås også i Junior størrelse

H-puden er specielt egnet til lejring af ben i sideliggende stilling. Til at korrigere adduktion og tonus af UE, med fokus på alignment. Desuden er puden anvendelig i rygliggende til at forebygge abduktion af UE og sikre, at hælene er fri af underlaget, hvis der er risiko for udvikling af tryksår.

Puden er en del af vores specialiserede puder, som vi ofte anvender hos mennesker med CP.



	Junior	
Længde	48 cm	35 cm
Bredde	30 cm	20 cm
Højde	30 cm	15 cm
Vægt	2 kg	0,6 kg

	Junior	
Varenummer	NTG18	NTG64
HMI nr	129991	134325

Tilbehør		Junior
Jerseybetræk	NTGB-18	NTGB-64

Zitsafe

ZitSafe pudens udformning gør det muligt at omslutte borger med nedsat trunkus stabilitet, øget tonus i OE eller motorisk uro. Så borger kan sidde stabilt og trygt på sengekanten eller ved siddende behandling på briks.

Pudens høje sider og den høje ryg danner en stabil ramme, som stabiliserer balance og forhindre baglæns fald eller sidelæns.

Den kan med fordel anvendes ved forflytning, tidlig mobilisering og behandling eller anden aktivitet siddende på sengekant eller briks

Armlænenes bevægelighed gør det muligt omslutte borgeren helt tæt om kroppen, hvilket giver tryghed i den siddende stilling. Materialets stabilitet gør at armlænenene giver borger mulighed for afsæt med brug af armene fra siddende til stående.



Bredde	70-95 cm
Innder bredde	25-60 cm
Armlæn højde	26 cm
Ryglæn højde	60 cm
Vægt	5,8 kg



Varenummer	NTG19
HMI nr	138488

Tilbehør	
Jerseybetræk	NTGB-19

Pudens design, formbarhed og stabilitet med en total vægt på 5,8 kg gør det muligt at sikre en stabil aktiv siddestilling.

Brug

Brugen af Next Generation positioneringspuder er beskrevet under hver enkelt pude. Her eksempler på brug af positioneringspuderne.

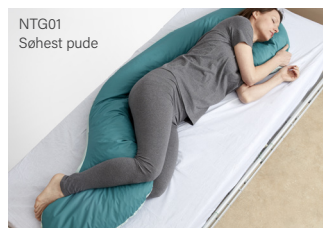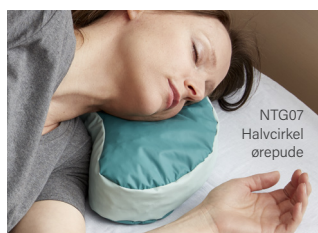


Efter brug

Next Generation positioneringspuder kan hurtigt vaskes af med desinfektionsmidler og tørrer i løbet af få minutter.

Vedligeholdelse og rengøring

Korrekte vedligeholdelses- og rengøringsrutiner er altafgørende for at forlænge levetiden af Next Generation positioneringspuder.

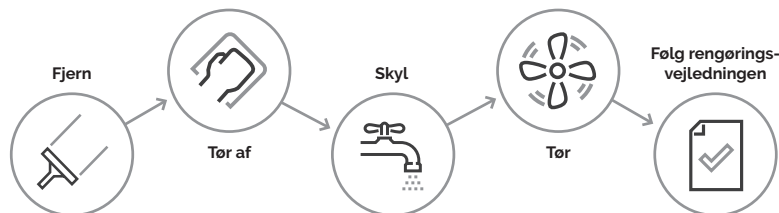

Fjern

Fjern snavs og spild på positioneringspuden, før rengøringen starter. Dekontaminering/sterilisering kan kun ske på overflader, som først er rengjorte og grundigt skyllet.

Tør af

Tør positioneringspuden af med en ren klud med desinfektionsmidler.

Skyl

Skyl positioneringspuden med rent vand efter desinfektion. Dette skal gøres for at forhindre ophobning af rester af desinfektionsmidler, hvilket kan resultere i:

- biokompatibilitet forringes
- rengøring med en højere koncentration end anbefalet, som kan betyde mulig beskadigelse af stoffet
- dannelse af slibende krystaller, der kan slide på overfladen af stoffet
- følsomhed for skader som følge af slid eller gennemstrækning

Tør

Tør positioneringspuden grundigt af med en ren, tør klud, før den tages i brug eller lægges væk. Våd stof er mere modtageligt for skade og slitage.

Følg rengøringsvejledningen

Følg altid disse instruktioner, når der bruges kemiske rengøringsmidler. Ikke alle rengøringsmidler kan anvendes på Next Generation positioneringspuderne. Kontakt info@makerehab.com for yderligere information eller se oversigten på næste side.

Yderligere rengøring

Next Generation positioneringspuderne bør desinficeres regelmæssigt ved brug. De skal skylles grundigt og tørres. Skal rutinemæssigt inspiceres for skader.

Håndtering og opbevaring

Tør Next Generation positioneringspuden grundigt af med en ren, tør klud, før den tages i brug eller lægges væk. Våd stof er mere modtageligt for skade og slitage.

Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse

Bortskaffelse og genbrug af brugte Next Generation positioneringspuder og emballage skal ske i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Sørg for at rengøre produktet inden bortskaffelse for at undgå risikoen for forurening.

 Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.

Referencer

CDC Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare facilities (2008) p.36.
BHTA 'Protect, Rinse and Dry' guidance on the care, cleaning and inspection of healthcare mattresses (2016) www.bhta.com/bhta-campaigns.
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). Sterilization, disinfection and cleaning of medical equipment: (guidance on decontamination from the Microbiology Advisory Committee MAC manual): Part 1 Principles. London: MHRA; 2010. (2), Part 2 Protocols. London: MHRA; 2005 p.20, Part 3 Procedures. London: MHRA; 2006 p.33-37

Retningslinjer for dekontaminering af
Next Generation positioneringspuder

	Metode	Aktiv %	pH-værdier egnet til desinfektion	Behandlingstid	Efter påføring	Indvirkning på stoffet
Anbefales	Klor og klorblandinger	1.000-10.000 millionte dele	7-9	<10 min. Afhængigt af styrken og blandingen	Skyl grundigt, og tør efter med tør klud. Lad stoffet tørre.	Anbefales Anvend opløsning på 1.000 millionte dele til daglig rengøring, og max 10.000 millionte dele til dekontaminering. Undgå at skrubbe hårdt på stoffet.
	Glutaraldehyd	2	7,5-8,5	Afhængigt af temperaturen	Skyl grundigt, og tør efter med tør klud. Lad stoffet tørre.	Anbefales
	Dampsterilisation	Ikke relevant	Neutral	3 min. - 134°C 10 min. - 126°C 15 min. - 121°C 30 min. - 115°C	Tør og returnér dragten til brug eller opbevaring.	Anbefales Høje temperaturer og lange dvæletider kan få stoffet til at krympe. Tjek altid, at stoffet tåler dampsterilisation.
	Brintoverilte	3-25 %	5-9	<5 min.	Skyl grundigt, og tør efter med tør klud. Lad stoffet tørre.	Anbefales Sørg for at skylle grundigt. Meget sure eller alkaliske peroxider bør undgås, da de vil beskadige stoffet.
Anbefales med forbehold	Alkohol	Typisk 70	-	Max 10 min.	Skyl grundigt, og tør efter med tør klud. Lad stoffet tørre.	Anbefales med forbehold Stoffets overflade kan svulme op og gå i stykker. Behandl derfor stoffet forsigtigt, indtil det er helt tørt.
	Ethylenoxid	3	-	>30 min. Temperatur- afhængig	Skyl grundigt, og tør efter med tør klud. Lad stoffet tørre.	Anbefales kun til sterilisering Sørg for, at steriliseringen er valideret og klar til brug. Kræver rengøring bagefter.
	Kvartær ammonium blandinger	3-15 %	7-10	Varierer	Skyl grundigt, og tør efter med tør klud. Lad stoffet tørre.	Anbefales med kraftige forbehold Kvaternære opløsninger med en pH> 10 anbefales ikke. Brug ikke klude indeholdende natrium-hydroxid (NaOH).
Anbefales IKKE	Iodoforer	75-100 millionte dele	Syre	<20 min.	Udsættes stoffet for iodoforer, skyl- les det med vand og tørres efter med tør klud. Lad stoffet tørre.	Anbefales ikke Farvning og syreholdige produkter reducerer stoffets levetid.
	Pereddikesyre	0,2-0,35	-	<20 min.	Skyl grundigt, og tør efter med tør klud. Lad stoffet tørre.	Anbefales ikke Syrens PH vil ødelægge stoffet.
	Fenoler	2-12 %	-	10 min.	Kassér.	Anbefales ikke Fenolers syregenskaber ødelægger stoffet.
	Tør varme	Ikke relevant	Neutral	10 min. - 126°C 15 min. - 121°C 30 min. - 115°C	Kassér.	Anbefales ikke Tør varme blødgør stoffet, hvilket ødelægger det over tid.

Specifikationer og dokumentation

Rengøring	Overtørring med desinfektionsmidler
Stof	Strækbart og slidstærkt
Vandtæt	Ja Godkendt i henhold til ISO 811 Textile fabrics - determination of resistance to water penetration - hydrostatic pressure test
Antibakteriel	Ja Godkendt i henhold til: BS EN ISO 2286-2 Rubber- or plastics-coated fabrics - determination of roll characteristics - methods for determination of total mass per unit area, mass per unit area of coating and mass per unit area of substrate ISO 5978 Rubber- or plastics-coated fabrics - determination of blocking resistance BS ISO 22196 Plastics - measurement of antibacterial activity on plastics surfaces
Åndbar	Ja Godkendt i henhold til ASTM E96/E96M Test methods for water vapor transmission of materials
Brandhæmmende	Ja Godkendt i henhold til BS EN ISO 6940 Textile fabrics - burning behaviour - determination of ease of ignition of vertically oriented specimens
Biokompatibilitet	Ja Godkendt i henhold til BS EN ISO 10993-5 Biological evaluation of medical devices - part 5: tests for in vitro cytotoxicity
Holdbarhed	Ja Godkendt i henhold til BS EN ISO 7854 Rubber- or plastics-coated fabrics - determination of resistance to damage by flexing
Beskyttende tøj	Ja Godkendt i henhold til BS EN 14605 Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (type 3) or spray-tight (type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (types pb [3] and pb [4])
Antistatisk	Ja Godkendt i henhold til DIN ISO 2878 Rubber, vulcanized - antistatic and conductive products - determination of electrical resistance

Garanti

Garantiperioden for Next Generation positioneringspuder er 1 år fra købsdato. Fakturaen er "garantibevis". Make Rehab A/S påtager sig ikke ansvaret for beskadigelser, der skyldes fejlagtig brug eller manglende overholdelse af anvisningerne i denne brugsanvisning.

Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden normal slitage, som er afgjort af Make Rehab A/S, er ikke omfattet af denne garanti.

Garantien bortfalder, hvis der er foretages uautoriserede ændringer af produktet.

Forhandler / Producent

Make Rehab A/S
Fuglebækvej 4J
2770 Kastrup

Dato
09/2023